

Uwaga

Wyrobów ortopedycznych nie należy nosić, jeżeli ogrzanie lub ciepło wywołują reakcję alergiczną. W takim wypadku należy skontaktować się z lekarzem.

Uwaga

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Uwaga

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

Sposób utylizacji wyrobu po wycofaniu z eksploatacji

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny.

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer Seryjny:

Pieczęć punktu sprzedaży
i czytelny podpis Sprzedawcy

1. Firma ANTAR Sp.J. 03-068 Warszawa, ul. Zawiańska 43 udziela niniejszym 12 miesięcznej gwarancji na wyrób od daty wydania produktu kupującemu. Dla wyrobów, których zakup był refundowany przez NFZ obowiązuje przedłużony okres gwarancji równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został w rozporządzeniu określony w miesiącach lub w latach.
2. W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się dokonać niezbędnych napraw, w celu przywrócenia zestawu do prawidłowego funkcjonowania w terminie 14 dni od daty otrzymania przez serwis reklamowanego towaru, wraz z dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
3. ANTAR zastrzega sobie prawo wymiany produktu, w przypadku, gdy uzna że koszty naprawy czynią ją nieopłacalną. Naprawa lub wymiana uszkodzonego produktu nie przedłuża okresu gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia, iż wyrób funkcjonuje nieprawidłowo, należy bezzwłocznie wysłać na adres firmy ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem, w którym dokonano zakupu.
5. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi i ściśle jej przestrzegać. Eksploatacja wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwracalną utratę gwarancji.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe na skutek przebicia lub przecięcia wyrobu ostrym przedmiotem, uszkodzenia na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zetknięcia wyrobu ze spirytusem, substancjami tłustymi lub oleistymi, benzyną.
7. Wyrób przesłany do serwisu w ramach reklamacji nie może stwarzać zagrożenia epidemiologicznego.
8. NINIEJSZY DOKUMENT GWARANCJI JEST WAŻNY WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (PARAGONEM, RACHUNKIEM, FAKTURĄ). PROSIMY O DOŁĄCZANIE DOWODU ZAKUPU W PRZYPADKU SKŁADANIA KAŻDEJ REKLAMACJI. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA WYROBÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NFZ, KONIECZNE JEST DOŁĄCZANIE KOPII „ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE”.
9. Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z wpisanym numerem serii produktu nie będą uwzględniane.



Antar Sp. J.
Adres: ul. Zawiańska 43, 03-068 Warszawa
TEL: +48 22 518 36 00
FAX: +48 22 518 36 30
E-mail: antar@antar.net
www.antar.net



Data wydania instrukcji: 21.05.2021

v1-2 21.05.2021



Instrukcja użytkowania


Orteza z tworzywa sztucznego na gołe i stopę

Model: AT53028




Orteza z tworzywa sztucznego na gołeń i stopę


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

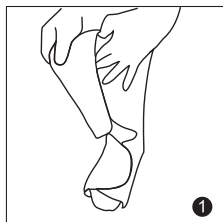


1. Włóż stopę w skarpetę dołączoną do zestawu (skarpetka chroni kostkę, przyspiesza proces gojenia i absorbuje pot, skarpetę można prać jeżeli zabrudzi się) a następnie umieść ją w piankowej wkładce i zaciśnij tak, aby wkładka przylegała do stopy.

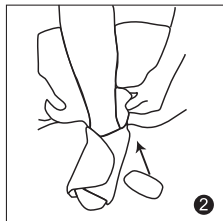

2. Możesz umieścić zestaw podkładek, aby uzupełnić przestrzeń we wkładce lub pomiędzy wkładką a częścią stałą ortezy.

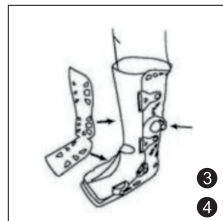

3. Stopę owiniętą wkładką umieść w butcie i wyrównaj z obydwu stron do osi bocznej. 4. Umieść przedni panel i upewnij się, że pianka jest dobrze przykryta.

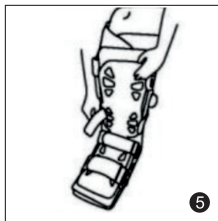

5. Zaciśnij po kolei wszystkie pasy i zabezpiecz je.

Jak działa komora powietrzna?



1. Do napełnienia komory powietrzem należy wykorzystać pompkę dołączoną do zestawu, wkładając końcówkę „in” w przeznaczony do tego otwór znajdujący się z przodu ortezy.



2. Do opróżnienia komory z powietrzem należy wykorzystać pompkę dołączoną do zestawu, wkładając końcówkę „out” w przeznaczony do tego otwór znajdujący się z przodu ortezy.

Tabela rozmiarów

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	36-39	40-44	44-46,5	46,5+

Przeznaczenie

Orteza stawu skokowego jest wykorzystywana zarówno w przypadku różnego rodzaju urazów stawu skokowego, ale także w przypadku rehabilitacji stawu skokowego po doznanych uprzednio urazie oraz w przypadku zmian zwyrodnieniowych w stawie skokowym.

Wskazania

- Skręcenia stawu skokowego
- Pęknięcie kości stopy
- Uszkodzenia tkanki miękkiej ścięgna Achillesa
- Pooperacyjne leczenie urazów stawu skokowego i stopy
- Owrzodzenia, stopa cukrzycowa

Instrukcja prania

- Prać w zimnej wodzie, w cyklu dla tkanin delikatnych, używając łagodnego mydła.
- Nie używać wybielacza.
- Nie wystawiać na działanie źródeł ciepła.



PRANIE
RĘCZNE W
TEMP. 30



NIE MOŻNA
WYBIELAĆ
I CHLOROWAĆ



NIE MOŻNA
PRASOWAĆ



NIE CZYSZCZ
CHEMICZNE



NIE SUSZYĆ
W SUSZARCE
BĘBNOWEJ